

دفترچه راهنمای فارسی
دستگاه اندازه گیری قند فون

EASYGLUCO™
&
EASYGLUCO™
Auto-coding



بدون نیاز به کد گذاری در مدل
بیمارستانی (AUTO-CODING)


نمایش نوع فعالیت کاربر

دارای ۱۰۰ شناسه مختلف

دکمه فارغ کننده نوار

ضمانتنامه مادام العمر

پرگه گارانتی مخصوص مشتری

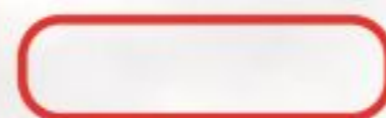

تاریخ خرید:

شماره سریال گارانتی

مدل دستگاه:

سریال دستگاه:

نام خریدار:

نام فروشنده با مهر:

در موارد زیر دستگاه مشمول گارانتی نمی باشد:

- ۱- خسارتهایی که در اثر بلایای طبیعی آتش سوزی ضربه و یا رطوبت ایجاد شده باشد.
- ۲- انجام هرگونه تعمیر و باز نمودن دستگاه بوسیله افراد غیر مجاز.
- ۳- عدم درج مشخصات کامل قید شده در روی برگه ضمانتنامه شرکت و مشتری.
- ۴- همراه نداشتن کارت ضمانتنامه مشتری.
- ۵- ضمنا باطری و لوازم جانبی مشمول گارانتی نمی باشد.

KTM کامیاب طب مداوا

تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به طالقانی - خیابان بزرگمهر

پلاک ۳۶ - طبقه اول واحد ۲

بخش آموزش و خدمات پس از فروش: ۶۶۹۷۷۶۵۶


URL: www.ktmmed.com

www.easygluco.ir

E-mail: info@ktmmed.com

فروشنده محترم لطفا هنگام فروش مهر و تاریخ فراموش نشود


www.infopia21.com

 شرکت کامیاب طب مداوا

به نام خدا

صفحه	موضوع
B_C	توصیه های ویژه
1	مشخصات دستگاه
3	علائم نمایشگر
4	نوار تست
5	تنظیمات اولیه
8	تنظیمات کد دستگاه
9	تنظیمات کد دستگاه اتوکدینگ
11	نحوه گرفتن یک قطره خون
13	انجام آزمایش
17	خارج کردن نوار تست از دستگاه
18	بازبینی نتایج
19	اتصال به رایانه
20	پاک نمودن نتایج
21	راهنمای حل مشکلات
24	مشخصات

با رعایت کردن موارد زیر می توانید از نتایج آزمایشات با دقت کافی برخوردار شوید، قبل از استفاده دفترچه راهنمای فارسی را کاملا مطالعه نمایید.

۱- لطفا نوار را از سمت فلش داخل دستگاه قرار دهید و دقت نمائید که ناخن های شما به نوار آسیب نرساند.

۲- هر بار که نوار داخل دستگاه می گذارید دقت نمائید که کد دستگاه و نوار یکسان باشد (کد نوار بر روی قوطی چاپ شده است و کد دستگاه هنگام وارد کردن نوار به دستگاه بر روی LCD ظاهر می گردد)

۳- قبل از هر آزمایش دستانتان را با آب و صابون شسته و خشک نمایید و هیچگاه از پنبه و الکل جهت تمیز کردن دست و دستگاه استفاده ننمائید.

۴- این دستگاه برای خون گرفتن از مویرگ سر انگشتان دست ساخته شده است هیچگاه از خون ورید (رگ) و دیگر اعضاء بدن جهت آزمایش قند استفاده ننمائید.

۵- دقت کنید هنگام آزمایش گرفتن خون بر روی نوار ریخته نشود و فقط نوار تست را به خون نزدیک نمائید (نوار تست به طور اتوماتیک خون را مکش می کند)

۶- برای خون گرفتن از انگشت باید قبل از لنست زدن، دست و انگشت را ماساژ داده و خون را به سر انگشت مورد نظر هدایت کرد و باید بعد از لنست زدن خون از سر انگشت به آرامی و بدون فشار خارج شود (چنانچه خون به سختی و با فشار زیاد خارج شود گلوبولهای خون می شکنند و خون ناسالم می شود

و نتیجه آزمایش صحیح نمی باشد).

۷- باید زمانی که نوار تست را داخل دستگاه می گذارید تا زمان نتیجه آزمایش کمتر از ۵ دقیقه باشد (بهتر است قبل از آزمایش لنست خود را داخل اتولنست گذاشته تا آماده باشد).

۸- دقت فرمائید بعد از برداشتن نوار تست از داخل قوطی فوراً درب قوطی را ببندید تا نوارهای دستگاه با کیفیت خوب و ماندگاری بالا بماند و حساسیت و دقت آنها کم نشود (در غیر اینصورت نتیجه آزمایشها با اختلاف روبرو می شود).

۹- چنانچه دو بار متوالی بدون اتلاف وقت آزمایش می گیرید نباید از همان سوراخی که قبلاً توسط اتولنست سوراخ زده اید خون بگیرید (می بایست توسط اتولنست سوراخ جدید بر روی دست بزنید و خون جدید بگیرید).

۱۰- دقت کنید واحد اندازه گیری دستگاه بر واحد میلی گرم باشد.

۱۱- در مواردی که دستگاه را با آزمایشگاه مقایسه می کنید حتماً برای خون گرفتن از لنست خود دستگاه و از سر انگشتان برای دستگاه خود خون بگیرید و هرگز از خونی که از ورید گرفته می شود برای دستگاه استفاده نشود و می بایست بلافاصله بعد از گرفتن خون از ورید (رگ) از سر انگشت خون بگیرید.

۱۲- در صورتیکه دستگاه جواب تست قند خون شما را پایین تر از 60mg/dl (3.3mmol/L) و یا بیشتر از 240mg/dl (13.3mmol/L) نشان دهد. آزمایش را دوباره تکرار کنید. اگر برای بار دوم نیز جواب فوق را به دست آورید، با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

دستگاه اندازه گیری قند خون شامل اجزای ذیل می باشد



● دستگاه Easy gluco

● نوار تست

● دستگاه لفت زن، لفت

● دفترچه جمع آوری اطلاعات بیمار

● کارت گارانتی مخصوص شرکت

● باتری ۳ ولت Cr2032

● کیف مخصوص

● دفترچه راهنمای فارسی



محلی که نوار تست قرار می گیرد

دکمه خارج کننده نوار

نمایشگر دستگاه
نتایج آزمایش - نشانگرها و پیغامها در
این قسمت نمایش داده می شود

دکمه عملیاتی


دستگاه را روشن و خاموش می نماید
وارد حافظه دستگاه می شوید
و بعنوان ثبت کننده اطلاعات در زمان
تنظیم پارامترهای دستگاه

دکمه بالا و پایین

تنظیم نمودن اطلاعات دستگاه
چک نمودن حافظه دستگاه
تنظیم کد نوار(دستگاه


EASYGLUCO™
Auto-coding

نیازی به تنظیم کد ندارد)

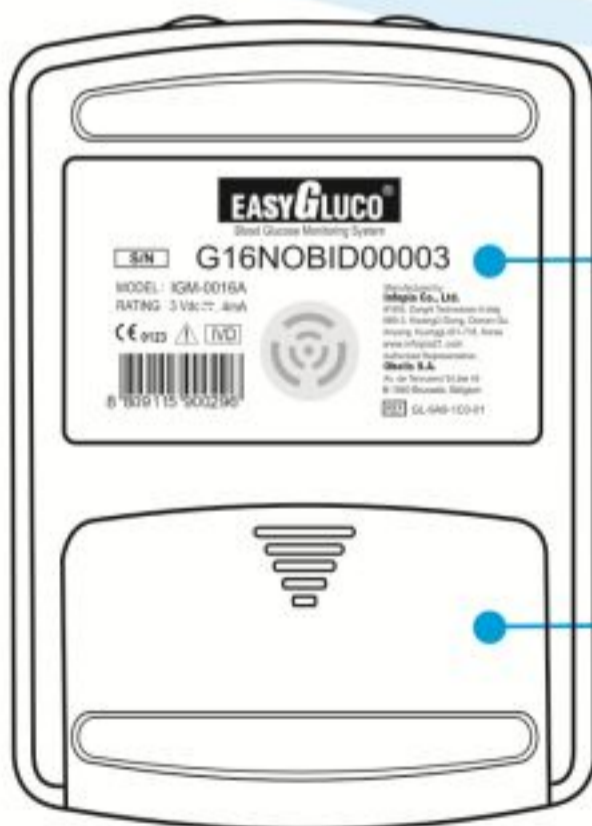

لیبل دستگاه

درپوش باتری

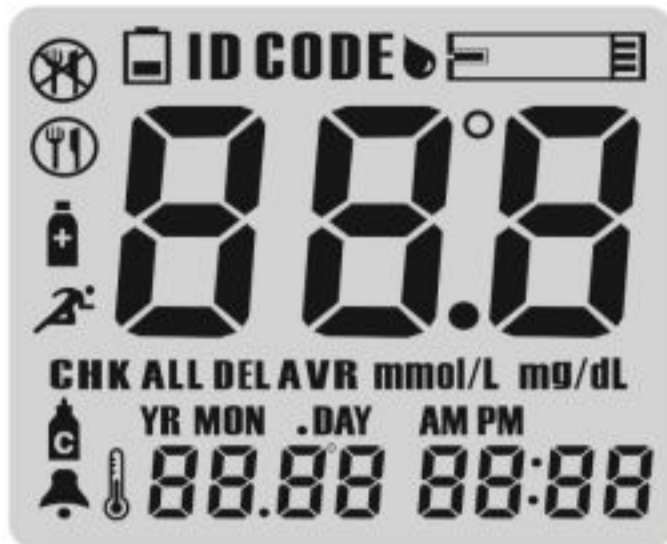

قبل از خوردن غذا



بعد از خوردن غذا



بعد از استفاده دارو



بعد از ورزش

نمایشگر جهت آماده
بودن دستگاه جهت آزمایش

88.8

نمایش نتیجه آزمایش



اخطار اتمام باتری



محلول کنترل

YR MON.DAY
8888

دما/زمان

mmo/L mg/dL

واحد نمایش قند خون

AVR

میانگین نتایج آزمایش

88:88

نمایش تاریخ و زمان
انجام تست



زنگ

ID CODE

شناسه استفاده کننده



اطلاعات مهم در مورد نوار تست

- ۱- نوار تست را در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری و از قرار دادن در یخچال و فریزر خودداری نمائید. (دمای بین ۲ تا ۲۰ درجه)
- ۲- نوارهای تست را فقط در قوطی مربوط نگهداری و از جابجا نمودن آنها جدا خودداری فرمائید.
- ۳- بعد از بیرون آوردن هر نوار تست سریعاً درب قوطی نوارها را ببندید.
- ۴- بعد از باز نمودن هر قوطی نوار تنها می توانید به مدت ۳ ماه از نوارهای آن استفاده نمائید و پس از این مدت باید نوارهای باقیمانده را دور بریزید. (تاریخ باز کردن قوطی نوار را بر روی لیبل قوطی یادداشت نمائید)
- ۵- از خیس و کثیف شدن نوارها خودداری نمائید و از تماس دستهای مرطوب با نوارها اجتناب ورزید.
- ۶- هیچگاه از نوارهایی که تاریخ آنها منقضی شده اند استفاده نکنید.
- ۷- نوارهای تست را خم و یا پاره ننمائید.
- ۸- هر نوار تست تنها برای یک بار استفاده می باشد و از استفاده مجدد آنها خودداری نمائید.

دستگاه اندازه گیری قند خون EASY GLUCO دارای کارکرد های متنوع و گوناگون می باشد. تاریخ، ساعت ۵ آلام در روز (شناسه) شخصی هر استفاده کننده - دارای قابلیت های طبقه بندی عملکرد بیمار نسبت به زمان تست و دارای قابلیت اندازه گیری ۳ نوع میانگین خاص.



دکمه ① را بمدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.




با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ نمایش حالت انجام تست بیمار را مشخص نمایید. سپس دکمه ① را فشار دهید.




با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ شناسه شخصی را فعال و یا غیر فعال نمایید. سپس دکمه ① را فشار دهید.



با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ سال مورد نظر را تنظیم نمایید. سپس دکمه ① را فشار دهید.

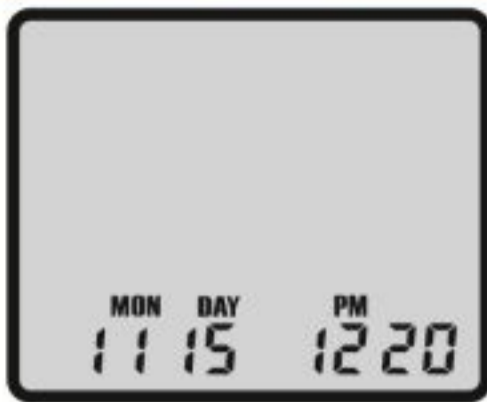

با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ روز و تاریخ دستگاه را تنظیم نمایید. سپس دکمه ① را فشار دهید.

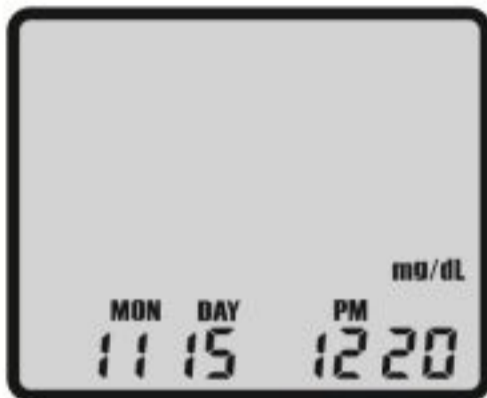

با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ واحد اندازه گیری را انتخاب نمایید سپس دکمه ① را فشار دهید.



با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▲ یا ▼ واحد اندازه گیری درجه حرارت را انتخاب نمایید سپس دکمه ① را فشار دهید.



میانگین اول

با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ تعداد روزهای اندازه گیری ۳ میانگین (۷ الی ۹۰ روز) را انتخاب نمایید، سپس کلید ① را فشار دهید.



میانگین دوم



میانگین سوم



با فشار دادن و رها کردن کلید های ▼ یا ▲ زنگ دستگاه را روشن / خاموش نمایید. سپس دکمه ① را فشار دهید.



با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ زنگ دستگاه را تنظیم نمایید و سپس دکمه ① را فشار دهید.



با فشار دادن و رها کردن کلیدهای ▼ یا ▲ آلارم دوم دستگاه را فعال یا غیر فعال نمایید سپس دکمه ① را فشار دهید.

نکته: شما می توانید ۵ زمان متفاوت جهت زنگ زدن دستگاه و همچنین ۳ برنامه اندازه گیری میانگین مختلف برای دستگاه تعریف نمایید. در زمان وارد نمودن اطلاعات دقت نمایید پارامترها را درست تنظیم نمایید. در زمان تنظیم دستگاه نمی توانید آزمایش انجام دهید. برای خاموش نمودن دستگاه در زمان تنظیم پارامترها دکمه ① را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

تنظیم نمودن کد دستگاه:

کدها جهت کالیبره نمودن نوار با دستگاه برای بدست آوردن جواب دقیق استفاده می شود. شما می بایست قبل از استفاده از دستگاه کد صحیح را وارد نمایید و کد نمایش داده شده روی دستگاه می بایست با کد روی جعبه نوار یکسان باشد. این کد باید هر بار که از بسته نوار جدیدی استفاده می شود وارد دستگاه گردد.

مرحله ۱- یک عدد نوار را وارد دستگاه نمایید تا دستگاه روشن شود کد موجود در دستگاه برای ۲ ثانیه روی صفحه نمایش داده می شود. کد روی دستگاه را با کد روی نوار مقایسه کنید. (برای مثال C23) اگر این دو کد یکسان بودند میتوانید آزمایش را انجام دهید.

مرحله ۲- اگر این دو کد یکسان نبودند با فشردن دکمه ▼ و ▲ کد صحیح را انتخاب نمایید. کد نمایش داده شده روی صفحه نمایشگر دستگاه با هر بار فشرده شدن دکمه ▲ یک واحد افزایش و با فشردن دکمه ▼ یک واحد کم می شود. پس از انتخاب کد صحیح این عدد برای چند ثانیه نمایش داده می شود و سپس علامت آماده بودن دستگاه جهت آزمایش (شکل نوار تست) روی صفحه نمایش داده می شود.

نکته مهم: هر زمان که می خواهید تست قند را انجام دهید حتما از یکسان بودن کد نمایش داده شده توسط دستگاه و کد روی جعبه نوار مطمئن شوید. اگر کد روی بسته نوار و کد نمایش داده شده توسط دستگاه یکسان نباشد شما از آزمایش قند خون خود نتیجه دقیقی بدست نخواهید آورد.



توجه

توجه

در دستگاه EASYGLUCO-AUTOCODING (مدل بیمارستانی) تنظیم کد بصورت اتوماتیک به شرح ذیل انجام می شود.



۱- دستگاه:

EASYGLUCO-AUTOCODING

دارای سیستم خواندن اتوماتیک کد نوار می باشد.

که بعد از وارد کردن نوار کد نوار با کد دستگاه اتوماتیک تنظیم می شود



۲- دستگاه کد را بصورت اتوماتیک از روی نوار تشخیص می دهد این روش بسیار راحتی می باشد که هیچگاه در ورود کد نوار به دستگاه اشتباهی پیش نخواهد آمد.


قبل از انجام آزمایش موارد مورد نیاز را آماده نمایید .




- دستگاه اندازه گیری قند خون
- نوار اندازه گیری قند خون
- دستگاه لنست زن
- لنست
- دستمال کاغذی

infopia نکته مهم:
جهت کاهش احتمال عفونت:

- دستگاه لنست زن و لنست خود را به فرد دیگری ندهید.
- همیشه از یک لنست جدید استفاده کنید.
- مراقب با شید لنست و دستگاه لنست زن شما به روغن و کرم دست و یا گرد و خاک آغشته نباشد.
- قبل از انجام آزمایش دستهای خود را شسته و سپس کاملاً خشک نمایید.
- هیچگاه از الکل جهت تمیز کردن دست یا دستگاه استفاده نکنید.

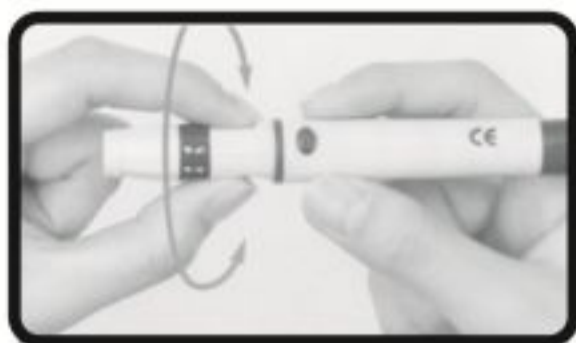

۱- کلاهک دستگاه لنست زن را با چرخاندن در خلاف عقربه های ساعت بردارید.

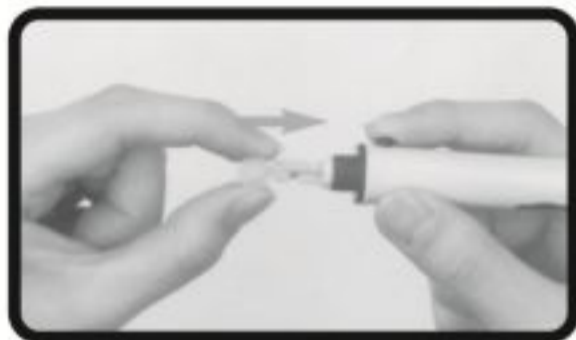


۲- یک عدد لنست جدید و سالم را در محفظه دستگاه لنست زن قرار دهید.




۳- لنست را نگه داشته و صفحه محافظ روی آن را چرخانده تا جدا شود.



۴- کلاهک دستگاه لنست زن را سر جای خود قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.

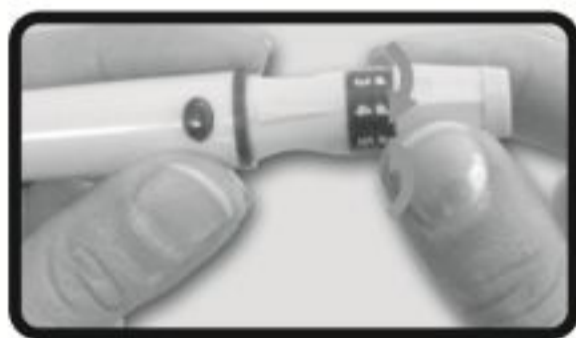

۵- نوک دستگاه لنست زن دارای ۵ درجه جهت سوراخ نمودن پوست می باشد، که توصیه می شود از شماره های ۱ - ۲ - ۳ استفاده نشود و برای اطفال از شماره ۴ و بزرگسالان از شماره ۵ استفاده شود.

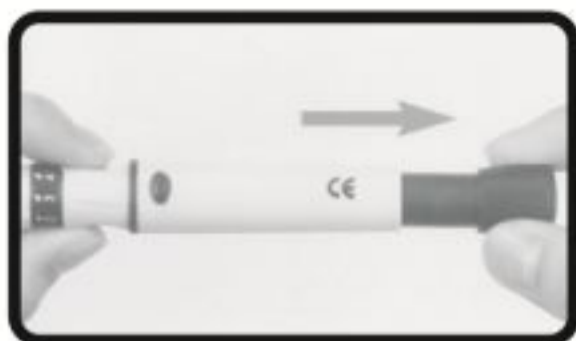

۶- نوک دستگاه لنست زن را نکه داشته قسمت انتهایی را با دست دیگر بکشید تا دستگاه لنست زن مسلح شود. و قسمت انتهایی را رها کرده تا به طور اتوماتیک به قسمت اول باز گردد.



۷- دستگاه لنست زن را روی نوک انگشت خود قرار داده و دکمه آزاد کننده را فشار دهید.

کلاهک دستگاه لنست زن را باز کنید، با احتیاط صفحه محافظ را روی لنست استفاده شده بچسبانید، نکه دارنده دستگاه لنست زن را با دست گرفته و لنست را خارج کنید. اگر روی دستگاه لنست زنی باقیمانده، آنرا تمیز نمایید.

نکته مهم: در هر بار آزمایش از یک لنست جدید استفاده نمایید. هیچگاه از لنستی که پوشش آن باز شده، یا خراب باشد استفاده ننمایید. تحت هیچ شرایطی از لنستی که توسط فرد دیگر بکار برده شده استفاده ننمایید.



قبل از شروع آزمایش دستهای خود را با آب گرم و صابون شسته و خوب خشک نمایید. مرحله ۱- نوار را داخل دستگاه EASY GLUCO نموده بصورتیکه علامت فلش به سمت جلو دستگاه باشد. دستگاه بطور اتوماتیک روشن شده و کد موجود در دستگاه و درجه حرارت محل روی نمایشگر ظاهر می شود. بعد از سه ثانیه کد دستگاه و درجه حرارت ناپدید می گردند. در صورتیکه کد دستگاه و نوار یکسان بودند به مرحله بعد وارد شوید در غیر اینصورت به قسمت تنظیم کد (صفحه 8) مراجعه نمایید. زمانیکه علامت شروع به چشمک زدن نمود، قطره خون را به لبه نوار نزدیک کنید. **نکته:** اگر نوار تست را از جهت نا درست وارد دستگاه نمایید. دستگاه روشن می شود ولی شما قادر به انجام آزمایش نمی باشید.

مهم:

- اگر در ۳ ثانیه اول بعد از داخل نمودن نوار به دستگاه کد نوار توسط دستگاه نشان داده نشد نوار را خارج و دوباره داخل دستگاه قرار دهید.
- اگر قطره خون را زودتر از اینکه دستگاه علامت مربوط را نمایش دهد به نوار نزدیک نماید. دستگاه Err5 را نمایش می دهد به صفحه 22 مراجعه نمایید.



درست




نادرست



مرحله ۲- لبه نوار تست EASY GLUCO را به قطره خون نزدیک نمایید. قطره خون روی انگشت شما بطور اتوماتیک به کانال روی نوار وارد می شود. انگشت خود را تا زمانی که صدای **Beep** از دستگاه شنیده نشده از روی نوار تست بردارید. مقدار خون مورد نیاز دستگاه $1/5\mu\text{l}$ می باشد.

نکته مهم: اگر پس از ۳ دقیقه از روشن شدن دستگاه از آن استفاده نکنید، دستگاه بطور اتوماتیک خاموش می شود و شما بایستی کلیه اعمال را از ابتدا آغاز نمایید.

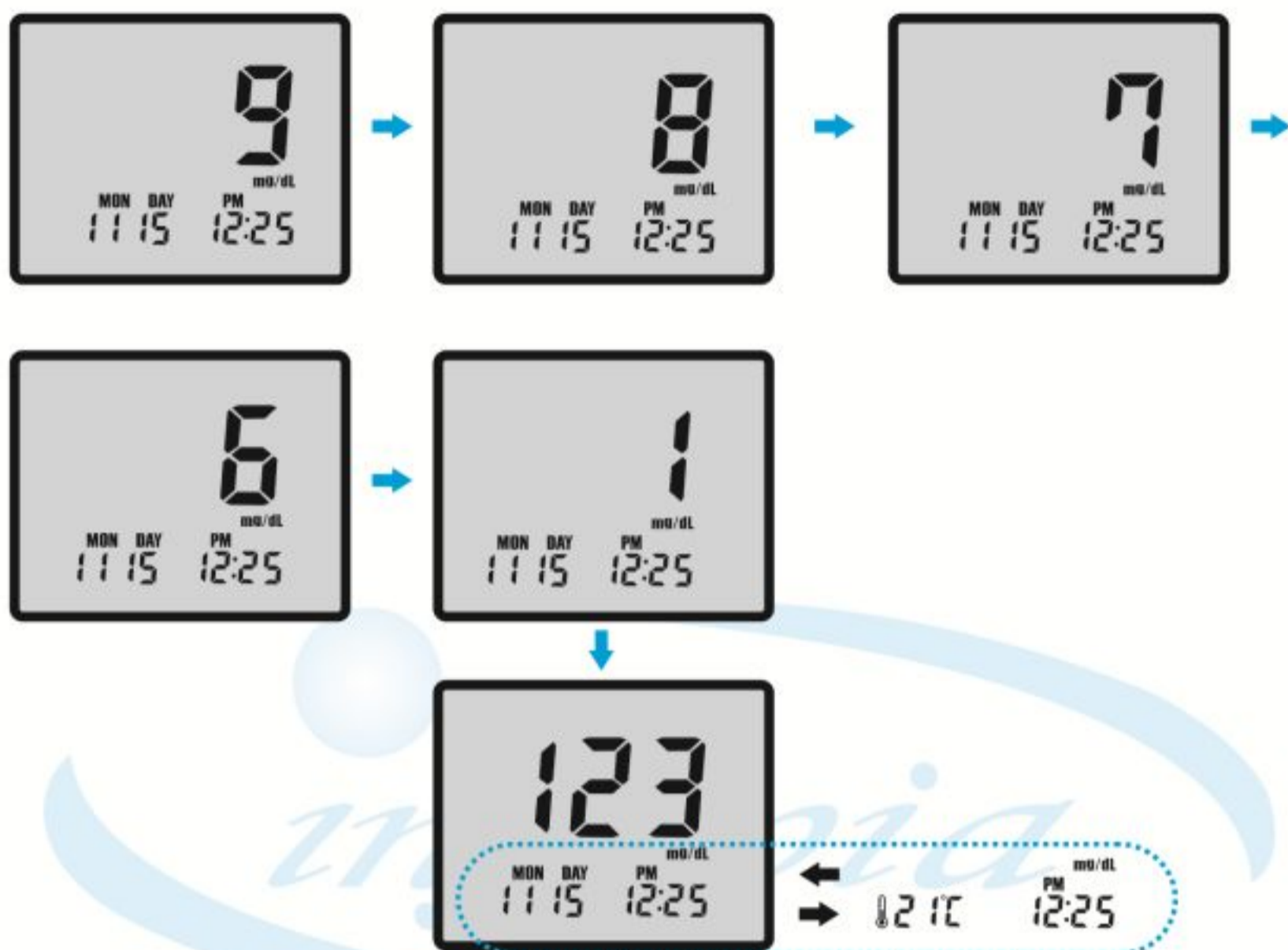

مرحله ۳- پس از وارد شدن قطره خون به کانال نوار- آزمایش بطور اتوماتیک آغاز می شود- و دستگاه شروع به شمارش معکوس از ۹ تا ۱ روی صفحه نمایشگر می نماید پس از ۹ ثانیه نتیجه آزمایش روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

نکته مهم: اگر نتیجه تست از رنج مورد نظر بالاتر یا پایین تر باشد پیغام مربوطه روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود به صفحه ۲۳ مراجعه شود.


مرحله ۱-۴

چنانچه در منوی تنظیمات اولیه وضعیت آزمایش را فعال نموده باشید شما می توانید نوع فعالیت انجام شده خود را که قبل از انجام آزمایش عمل نموده اید در دستگاه ثبت کنید. پس از انجام آزمایش دکمه ▼ یا ▲ را فشار داده و وضعیت مورد نظر را (قبل از غذا، بعد از غذا، مصرف دارو و هنگام ورزش) انتخاب کرده و دکمه ① را جهت ثبت فشار دهید.




مرحله ۲-۴

چنانچه در منوی تنظیمات اولیه منوی ID (شناسه) را فعال نموده باشید شما می توانید نتیجه تستها را جهت فرد خاصی ثبت نمایید. با فشار دادن کلیدهای ▼ یا ▲ (شناسه) فرد مذکور را انتخاب و دکمه ① را فشار دهید.

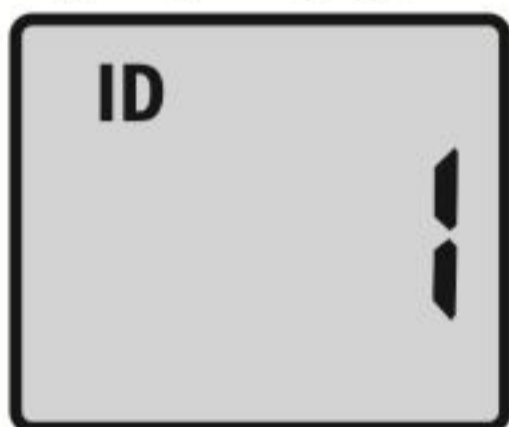

نکته مهم: اگر پس از پایان آزمایش نوار تست را از دستگاه خارج کنید نمی توانید موارد فوق را در دستگاه ثبت نمایید.

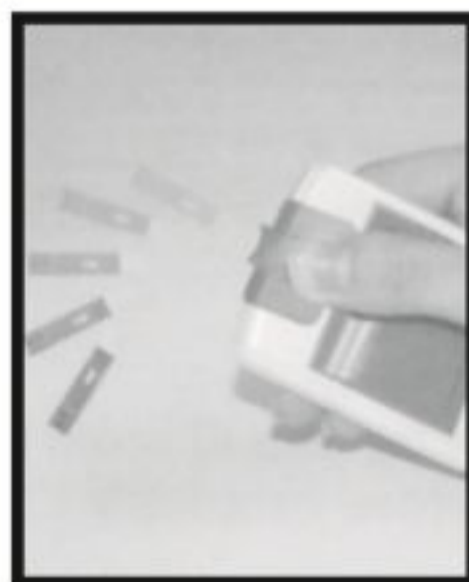


دکمه خارج کننده نوار تست: (strip ejector)

۱- بعد از چک کردن نتیجه آزمایش قند خون، دکمه خارج کننده نوار تست را دوبار به طرف جلو فشار دهید تا نوار تست از دستگاه خارج شود.

نکته مهم: اگر دکمه خارج کننده نوار تست را خیلی بسمت جلو فشار دهید ممکن است دکمه خراب شود. مراقب باشید به دستگاه فشار بیش از اندازه وارد ننمایید.

برای جلوگیری از عفونت و آلودگی بیماری های مسری بهتر است نوار را به سمت سطل زباله خارج نمایید.

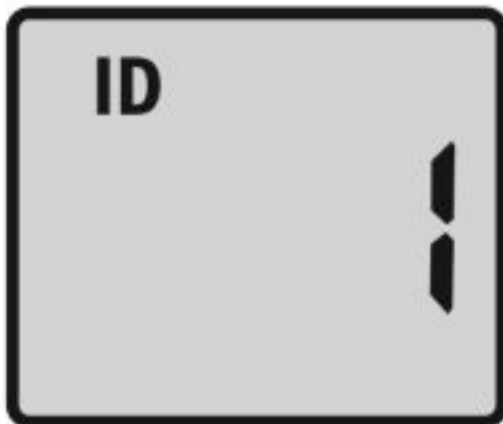

دکمه ① را یکبار فشار دهید و رها کنید. ID (شناسه) کاربر روی صفحه نمایش داده می شود.




بعد از وارد شدن به قسمت انتخاب ID (شناسه کاربر) با استفاده از دکمه های ▼ یا ▲ ID مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه ① را فشار دهید، تا نتایج آزمایشهای آن فرد خاص را بازبینی کنید.



در پایان بازبینی آزمایش های قبلی شما می توانید ۳ میانگین قند خون خود را که با علامت **d** و تعداد روزهای تنظیم شده است را رویت نمایید.

دستگاه EASY GLUCO دارای یک نرم افزار کنترل دیابت می باشد که می تواند کلیه نتایج تستها را در خود ذخیره نماید. تا فرد قادر باشد با رایانه شخصی خود آنها را بررسی و تحلیل نماید. شما می توانید نرم افزار فوق را از سایت ذیل بصورت رایگان تهیه نمایید.

<http://www.infopia21.com>

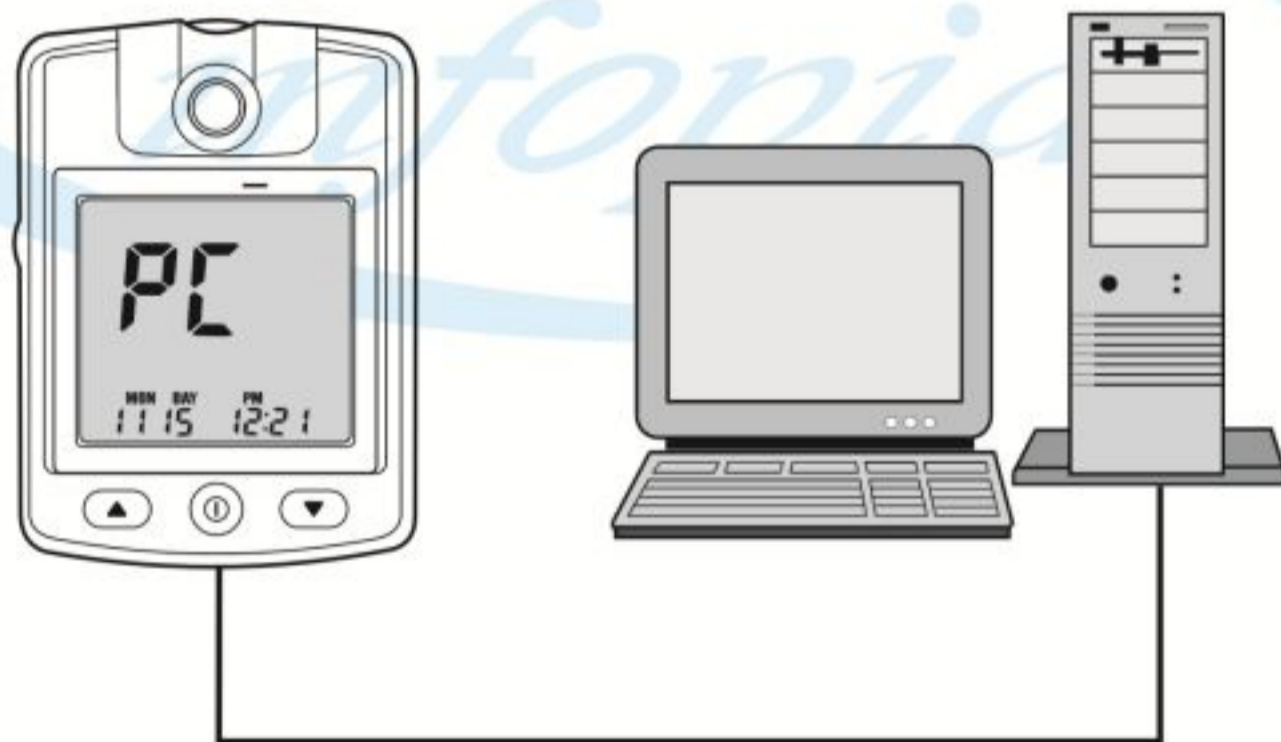

جهت دریافت سیم مخصوص ارتباط دستگاه با رایانه با شرکت کامیاب طب مداوا تماس حاصل فرمایید.



برای پاک کردن هر یک از اطلاعات موجود در حافظه دکمه ▲ یا ▼ را برای مدت ۳ ثانیه نگه دارید. زمانیکه نتیجه مورد نظر جهت حذف بر روی صفحه نمایش داده شد نشانگر **deL** روی صفحه چشمک می زند. بعد از صدای بیپ دوم نتیجه حذف می گردد.




پاک نمودن کلیه نتایج تستهای موجود در حافظه







برای پاک کردن کلیه نتایج تستها دکمه ▲ یا ▼ را با هم برای مدت ۳ ثانیه نگه دارید هنگامیکه هیچ نتیجه تستی روی صفحه نمایش داده نمی شود نشانگر **deL** روی صفحه چشمک می زند.

بعد از صدای بیپ سوم کلیه نتایج حذف می گردد.

در این بخش لیست کاملی از پیغامهایی که شما روی صفحه نمایشگر مشاهده می کنید همراه با معنی و مفهوم آنها و راه حل های رفع این موارد ارائه می دهیم

پیغام	مشکل	آنچه می بایست انجام دهید
	مشکل در دستگاه وجود دارد.	باتریها را دوباره در دستگاه قرار دهید. در صورت بروز مجدد مشکل با شرکت کامیاب طب مداوا تماس بگیرید.
	استفاده از نوار خیس یا دو بار استفاده شده	آزمایش را با یک نوار تست جدید انجام دهید.
	مشکل در نوار وجود دارد.	به قسمت تنظیمات مراجعه نمایید آزمایش را با یک نوار تست جدید انجام دهید. در صورت نمایش مجدد Er3 با شرکت کامیاب طب مداوا تماس حاصل فرمایید.

پیغام	مشکل	آنچه می بایست انجام دهید
	مشکل در نوار تست وجود دارد	آزمایش را دوباره با یک نوار تست دیگر انجام دهید. در صورت نمایش مجدد Er4 با شرکت کامیاب طب مداوا تماس حاصل فرمایید.
	قطره خون قبل از نمایش علامت توسط دستگاه به نوار وارد شده است	لطفا صبر کنید تا علامت روی صفحه نمایشگر چشمک بزند سپس قطره خون را به نوار وارد کنید
	درجه حرارت محل آزمایش بسیار پایین است.	دستگاه را در محلی که دما مناسب باشد برای مدت ۱۰ دقیقه قرار داده دوباره آزمایش را انجام دهید
	درجه حرارت محل آزمایش بسیار زیاد است.	دمای مناسب ۲ الی ۲۰ درجه

پیغام	مشکل	آنچه می بایست انجام دهید
	<p>نتیجه آزمایش پایین تر از 10mg/dl است</p>	<p>در این حالت دستگاه را با محلول کنترل چک نمایید و دوباره آزمایش را انجام دهید. در صورتیکه دوباره نتیجه قبلی را بدست آوردید. سریعا با پزشک خود مشاوره نمایید. و یا با بخش خدمات شرکت کامیاب طب مداوا تماس بگیرید. ۰۲۱-۶۶۹۷۷۶۵۶</p>
	<p>نتیجه آزمایش زبالا تر از ۶۰۰mg/dl است</p>	<p>در این حالت دستگاه را با محلول کنترل چک نمایید و دوباره آزمایش را انجام دهید. در صورتیکه دوباره نتیجه قبلی را بدست آوردید. سریعا با پزشک خود مشاوره نمایید. و یا با بخش خدمات شرکت کامیاب طب مداوا تماس بگیرید. ۰۲۱-۶۶۹۷۷۶۵۶</p>

نوع نمونه: خون کامل

میزان خون مورد نیاز: $1/5 \mu\text{l}$

رنج اندازه گیری: 10-600mg/dl

زمان اندازه گیری: ۹ ثانیه

کالیبراسیون پلاسما: equivalent

محدوده رطوبت: ۹۰٪-۱۰٪

محدوده دما: $10-40^{\circ}\text{C}$

صفحه نمایشگر: LCD

سایز: ۷۷x۴۶x۱۹ mm

وزن: ۴۲ گرم همراه با باتری

منبع نیرو: دو عدد باتری لیتیم (Cr2032)

واحد اندازه گیری: mmol/l-mg/dl

شناسه بیمار: ۱۰۰ مورد

حافظه: ۳۶۵ تست

گارانتی: مادام العمر

